

# SmartCase SC1530 series

## Bedienungsanleitung



## Inhaltsverzeichnis

<b>WAS IST EIN SMARTCASE? .....</b>	<b>3</b>
<b>FÜR IHRE SICHERHEIT .....</b>	<b>3</b>
<b>GARANTIE .....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUKT ÜBERSICHT .....</b>	<b>5</b>
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>6</b>
<b>OPERATION .....</b>	<b>10</b>
<b>WARTUNG UND FEHLERSUCHE .....</b>	<b>10</b>
<b>ENDE DER LEBENSDAUER .....</b>	<b>10</b>
<b>FEHLERBEHEBUNG: .....</b>	<b>11</b>
<b>GLOSSAR .....</b>	<b>12</b>
<b>ANHANG A: TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>13</b>


## Was ist ein SmartCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät zur Erstversorgung bei einem Herzstillstand. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der AED geschützt und gesichert ist und im Notfall für sofortige Hilfe zur Verfügung steht. Ihr SmartCase-Schrank bietet den ultimativen Schutz und gewährleistet die Verfügbarkeit des AED rund um die Uhr.

Der SmartCase-Außenschrank dient zum Schutz des AED vor äußeren Witterungseinflüssen. Das Edelstahlgehäuse in Kombination mit einem Polycarbonatfenster bietet ultimativen Schutz vor Korrosion und Stößen und bietet eine klare Sicht auf den AED. Um eine Temperatur über 0°C aufrechtzuerhalten, ist das SmartCase für den Außenbereich mit einem Temperatursensor und einer elektrischen Heizung ausgestattet. Der Schrank ist isoliert, um Energie zu sparen. Zusätzlicher Schutz vor hohen Sommertemperaturen wird durch aktive Belüftung erreicht.

## Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Alle Bediener sollten diese Sicherheitsaspekte prüfen, bevor sie den SmartCase AED-Schrank in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Wenn ein Problem auftritt, trennen Sie den Schrank vom Stromnetz und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es von qualifiziertem Personal überprüft wurde.

		Symbol
<b>Warnung:</b>	Warnhinweise machen Sie auf Bedingungen oder Handlungen aufmerksam, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.	

**Wichtig:** GT MEDICARE ist weder für den Inhalt dieses Dokuments noch für den Verlust von Daten, Einnahmen oder direkt oder indirekt verursachte Schäden verantwortlich. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle zugehörigen Produkte in diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt.

## Garantie

1. GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen für die Qualität der Dienstleistungen sowie für die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte verantwortlich, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die nachfolgend genannten Bestimmungen hinausgeht.
2. Die Gewährleistung basiert auf Hin- und Rücksendung. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistung hat der Käufer für die ordnungsgemäße Verpackung des Produkts zu sorgen, um Transportschäden zu vermeiden. Bei vom Käufer verursachten Mängeln gehen die Reparatur- und Versandkosten zu Lasten des Käufers.
3. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Gewährleistung:  
A: Wenn der Käufer die Produkte vernachlässigt hat.  
B: Wenn der Käufer Änderungen an den Produkten oder Reparaturen vorgenommen hat, die nicht von GT MEDICARE oder im Auftrag von GT MEDICARE durchgeführt wurden.  
C: Bei unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzschlag, Schäden durch Feuchtigkeit oder andere äußere Einflüsse oder Unglück.  
D: Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet wird.  
E: Wenn das Gerät mit nicht originalelem oder minderwertigem Zubehör verwendet oder installiert wird.  
F: Wenn der Käufer fahrlässig mit der Ware umgegangen ist.
4. GT MEDICARE gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung keine schwerwiegenden Mängel aufweisen.
5. Der Wiederverkäufer wird GT MEDICARE innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Produkte schriftlich über Mängel, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Inspektion vernünftigerweise festgestellt werden können, informieren. Der Wiederverkäufer wird GT MEDICARE alle anderen Mängel innerhalb eines Monats nach dem Lieferdatum schriftlich mitteilen. Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht konform oder beschädigt sind, sollten unverzüglich an GT MEDICARE zur Überprüfung durch GT MEDICARE zurückgeschickt werden. Reklamationen, die nicht gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes gemeldet wurden, werden nicht anerkannt. Falls GT MEDICARE für die Nichtkonformität oder Beschädigung des Produkts verantwortlich ist, wird sie nach eigenem Ermessen die Produkte reparieren, sie durch neue ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat gegenüber dem Wiederverkäufer keine anderen Verpflichtungen oder Haftungen in Bezug auf nicht konforme oder beschädigte Produkte als die im vorhergehenden Satz genannten.
6. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate. Kratzer und Beschädigungen am Gehäuse sowie Verschleiß sind von dieser Regelung ausgenommen. Der Hersteller ist nur verpflichtet, die sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Reklamation auf eine Veränderung oder unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen ist, erlischt die Garantie unter allen Umständen.
8. Der Empfänger wird alle erhaltenen Geräte unverzüglich untersuchen. Der Kunde muss GT MEDICARE innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Sendung schriftlich über etwaige Mängel informieren. Werden die Mängel nicht innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen gemeldet, gilt die Sendung als vollständig. Reklamationen sind nur innerhalb der Gewährleistungsfrist möglich. Wird eine Reklamation von GT MEDICARE anerkannt, so ist GT MEDICARE nur zum Ersatz der mangelhaften Ware oder zur Reparatur verpflichtet, ohne dass der Kunde Anspruch auf irgendeinen Schadenersatz hat. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden nicht von der Zahlung.

## Produktübersicht


- SmartCase AED-Wandschrank, mit vorinstalliertem Gerät:  
Auf der oberen Ablage:  
- 24V-Adapter  
- 3m Kabel für 230VAC-Anschluss  
- LED-Leuchten (rot und blau)  
- Alarm, +/-95dB  
Innenraum des Gehäuses:  
- Ventilator für aktive Belüftung  
- Elektrische Heizung & AED-
- Schnellmontageanleitungen (2x)
- Montagematerial
- Bausatz für Türgriff

### Montagematerial :



- Unterlegscheibe (4x)
- M8-Muttern (4x)
- Nylon-Abstandshalter (4x)
- Dübel (4x)
- Dübelschraube (4x)

### Innenansicht des Schrankes/Inside

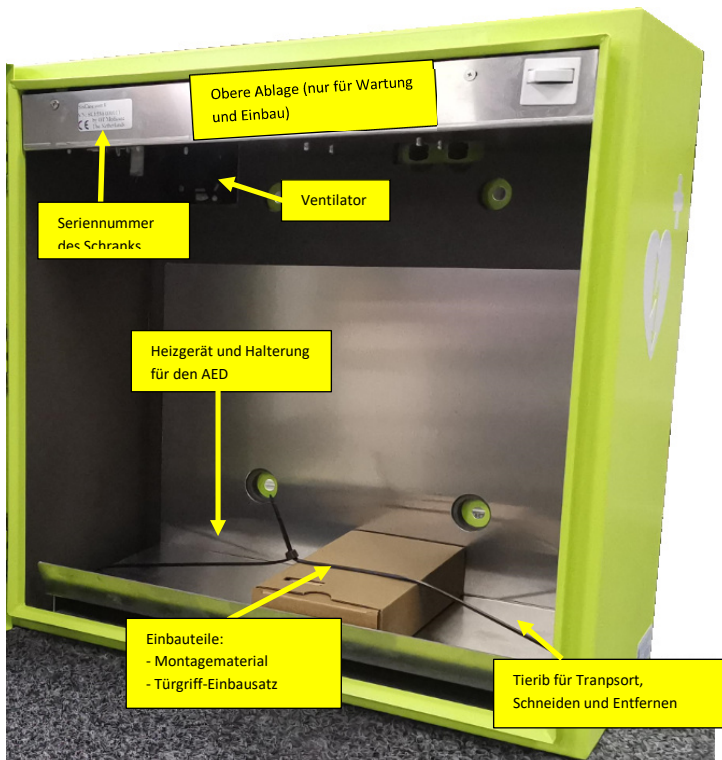

### Bausatz für Türgriff:



- Drehknopf (1x)
- Gummiring (1x)
- Mutter (1x)
- Nockenschloss
- Schraube (1x)

## Installation

### **Standort für den AED-Schrank:**

- Es wird empfohlen, einen leicht zugänglichen und gut einsehbaren Standort zu wählen.
- Der vorgesehene Standort für den Schrank muss eine ebene Fläche und einen ausreichenden Freiraum um den Schrank herum aufweisen (empfohlen wird ein Freiraum von mehr als 1m), um eine ordnungsgemäße Funktion und Installation zu ermöglichen. Unter dem Schrank sollten sich keine Hindernisse befinden.
- Die mitgelieferten Montagewerkzeuge sind ausschließlich für die Montage auf ebenen Flächen aus Holz, Mauerwerk oder Beton vorgesehen. Die Paneele/Wände müssen eine Mindeststärke von 3 mm haben. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.
- Wir empfehlen, den Schrank im Schatten zu montieren, um hohe Temperaturen im Schrankinneren zu vermeiden.
- Der Standort muss Zugang zum Stromnetz haben.

### **Installation auf Ziegeln oder Beton:**

Bohren Sie 4 Löcher für die Befestigungsbolzen (Dübelschrauben) mit einem Abstand wie in der "Schrankmontageanleitung" angegeben. Bohren Sie die runden 10-mm-Löcher mit einer Mindestdiefe von 60 mm, um eine ausreichende Tiefe für den Dübel zu gewährleisten. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe von 1,5 bis 1,6 m über dem Boden zu bohren. Die Löcher sollten immer in der Mitte des Ziegels gebohrt werden. Setzen Sie die M8-Dübelschrauben in die Dübel ein, bis sie 20 mm aus der Wand herausragen, und schieben Sie die Nylon-Abstandshalter über die Dübelschrauben. Bohren Sie das 12-mm-Einspeisungsloch (für den Anschluss an das Stromnetz) wie in der "Schrankmontageanleitung" gezeigt. Bevor Sie den Schrank an der Wand montieren, installieren Sie zuerst das Einspeisekabel.

Seien Sie vorsichtig: Wenn die Wand nicht sehr stark ist, empfehlen wir, Fischer VS 100P zu verwenden. Nachdem Sie die Flüssigkeit in die Löcher gesprüht haben, setzen Sie nur die Schrauben ein - verwenden Sie die Dübel nicht mehr. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Fischer-Etikett sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie die Löcher nach dem Bohren gründlich reinigen.

### **Montage auf Holz :**

Bohren Sie kleine Löcher mit einem Durchmesser von ca. 4 mm in das Holz, schrauben Sie den Drahtbügel fest in das Holz und montieren Sie den SmartCase wie oben beschrieben. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe von 1,5 bis 1,6 m über dem Boden zu bohren.

**Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf den nächsten Seiten.**



## Schrankmontageanleitung

### Montagematerial:




- Unterlegscheibe (4x)
- M8-Muttern (4x)
- Nylon-Abstandshalter (4x)
- Dübel (4x)
- Dübelschraube (4x)

Geeignet für die Montage auf Ziegeln/Beton oder Holz


#### WICHTIG:

- Erforderliche Mindestwandstärke: 3mm
- Auf einer ebenen Fläche installieren
- Verwenden Sie immer die Abstandshalter
- Empfohlene Höhe: 1,5 - 1,6m obere Löcher (über dem Boden)
- Installation im Schatten
- Für den Stromanschluss siehe nächste Seite

### Installation

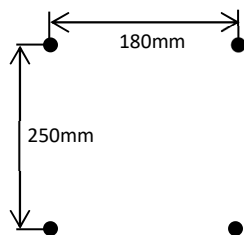

1. 10mm Löcher bohren (4x)
2. Einsatzdübel und Dübelschrauben (20mm Überstand)
3. Abstandshalter anbringen
4. Durchführungsloch: Bohren Sie ein 12-mm-Loch in die Wand für den elektrischen Anschluss an 220/230 V AC.

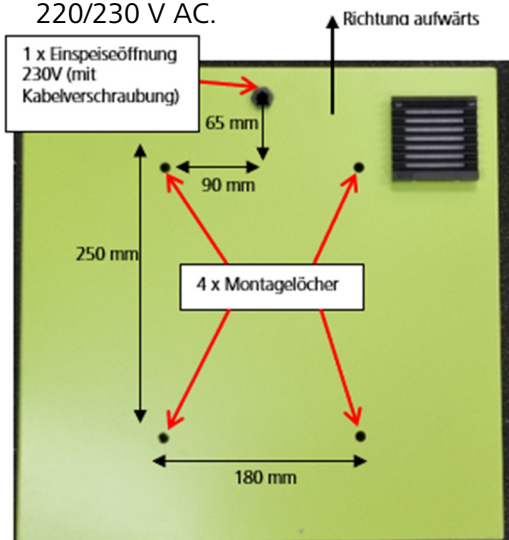

5. Gehäuse einbauen und Unterlegscheiben und M8-Muttern auf der Innenseite anbringen





**Elektrischer Anschluss des Schrankes: darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**

1) Montieren Sie den Schrank an der Wand (siehe vorherige Schritte). Öffnen Sie die Tür und öffnen Sie das obere Fach, indem Sie zwei Schrauben entfernen: 1 x vorne oben links und 1 x vorne oben rechts.



Trennen Sie die Stromzufuhr für das Kabel (230V AC), das zum Schrankstandort führt!

2) Installieren Sie das Stromkabel (230V AC, Teil des Einbausatzes) und führen Sie es durch die Einführungsöffnung auf der Rückseite des Schrankes (verwenden Sie die Kabelverschraubung, um das Kabel zu sichern).

3) Trennen Sie den Stecker (a) von der Buchse (b). Schrauben Sie den Stecker (a) ab und schließen Sie das 230V Stromkabel an den Stecker an: Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Drähte, wobei die Masse an den mittleren Stecker gelegt werden muss. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Stecker (a) mit den Schrauben und schieben Sie den Stecker (a) zurück in die Buchse (b). Prüfen Sie, ob die Verbindung (d) zum Adapter eingesteckt ist.



Vergewissern Sie sich, dass alle 230V-Wechselstromanschlüsse korrekt eingesteckt und gesichert sind und dass keine offenen Anschlüsse vorhanden sind.

4) Vergewissern Sie sich, dass das lokale Erdungskabel (c) immer noch mit dem Schrank auf der Rückseite verbunden ist.


5) Schließen Sie das obere Fach und verriegeln Sie es mit den beiden Schrauben aus Schritt 1). Vergewissern Sie sich, dass keine losen 230V Wechselstromkabel aus dem Fach herausgeführt sind, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Lokale Kabel des Schrankes sind für Heizung und Lüfterkühlung vorhanden und sicher (24V/DC).

6) Schließen Sie die Schranktür und schließen Sie das Stromkabel an das Stromnetz an (230V AC).

7) Überprüfen Sie den Schrank: Im Inneren des Schrankes sollte ein blaues Licht leuchten. Wenn der Schrank geöffnet wird, sollte ein rotes Blinklicht aufleuchten und ein Alarmton ertönen.




Halten Sie die Tür des Schrankes immer geschlossen (auch nach der Benutzung), um die korrekte Erwärmung des Schrankes zu gewährleisten und Probleme mit Feuchtigkeit/Wasser zu vermeiden.

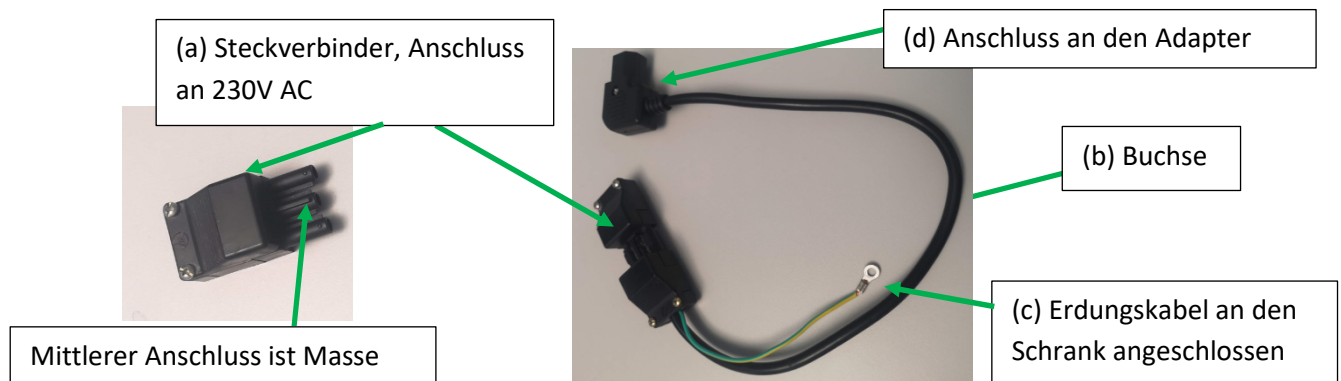



## INSTALLATION DES TÜRGRIFFS

### Bausatz für Türgriff:

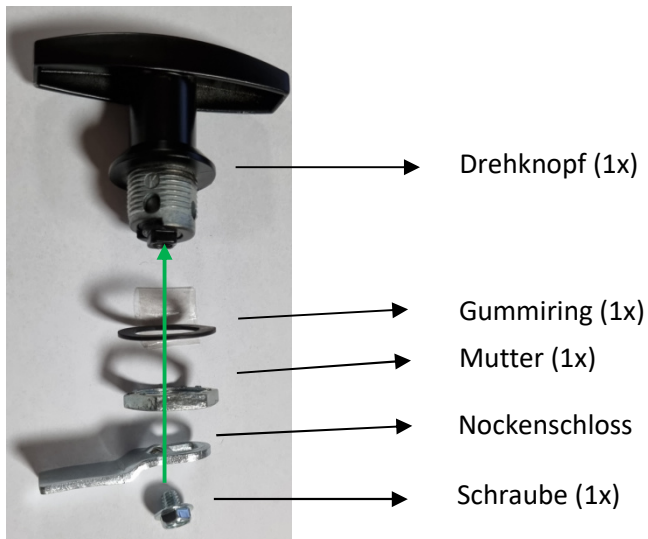

### Installation



1. Setzen Sie den Gummiring auf den Drehknopf und stecken Sie ihn durch das Loch in der Tür. Hinweis: Sie können die Verriegelung/Öffnung ändern, indem Sie den Drehknopf in verschiedenen Winkeln mit Schritten von 90 Grad einsetzen.



2. Mutter anbringen und festziehen. Dann Nockenschloss anbringen und schließlich schrauben. Beachten Sie, dass das Nockenschloss nur in einer Position auf den Drehknopf passen kann

3. Es wird empfohlen, die auf dem Aufkleber an der Außenseite des Schrankes angegebene Öffnungsrichtung zu beachten. Die Einstellung der Drehknopföffnung wird wie folgt vorgenommen: alle Teile ausbauen und den Drehknopf in die gewünschte neue Position zum korrekten Öffnen/Schließen drehen und die Installation von Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen.

## Operation

Die Anweisungen zum Öffnen und Schließen im Notfall sind auf dem Aufkleber an der Tür angegeben.

HINWEIS: Der Schrank muss immer geschlossen und verriegelt sein, um seine Funktion zu gewährleisten.

### Öffnung des Schrankes:

Drehen Sie den Türgriff, um die Tür des Schrankes zu öffnen. Wenn die Tür geöffnet ist, wird der Alarm mit einem unterbrochenen Ton und blinkenden roten Lichtern ausgelöst (der Alarm schaltet sich nach ca. 30 Sekunden automatisch ab).

### Schließung des Schrankes:

Schließen Sie die Tür (drehen Sie den Griff um 90 Grad, wenn das Schließen blockiert ist). Wenn der Alarm ertönt, verstummt er. Drehen Sie den Griff um 90 Grad, um den Schrank zu verriegeln.

## Wartung und Fehlersuche

Es wird empfohlen, den Wandschrank **monatlich** zu überprüfen. Die Überprüfung sollte aus einer Sichtprüfung bestehen, ob Schäden vorhanden sind, die den Betrieb des Schrankes beeinträchtigen könnten, und aus einer Überprüfung des Alarms (durch Öffnen und Schließen der Tür). Dabei sollten Sie den Status des Defibrillators sorgfältig beachten (siehe Handbuch des AED).



Die obere Ablage darf nur von qualifiziertem Personal betreten werden (Hochspannung).

Wenn Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren SmartCase-Händler. Je nach Art des Defekts kann es ratsam sein, den AED zu entfernen und die Benutzer über den Status (unbrauchbar) zu informieren.


**Temperatur:** Wenn Sie Zweifel an der Funktion der elektrischen Heizung haben (Außentemperatur unter 0°C / 32°F), entfernen Sie bitte den Defibrillator und kontaktieren Sie Ihren SmartCase-Händler. Der Schrank ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei 30°C schaltet sich der Lüfter ein, um die Wärme aus dem oberen Teil abzuführen und kalte Luft von unten anzusaugen. Wir empfehlen jedoch, den Schrank im Schatten aufzustellen, um hohe Temperaturen (über 50°C) zu vermeiden.

## Ende des Lebensdauer

Wenn der Schrank endgültig außer Betrieb genommen wird, achten Sie darauf, dass der Schrank ordnungsgemäß entsorgt wird, da er elektronische Teile enthält.



## Fehlerbehebung:

Symptom	Aktion
<b>LED-Leuchten sind aus oder der Alarm funktioniert nicht</b>	<p>Öffnen Sie das obere Fach (nur durch qualifiziertes Personal): </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warnung: Hochspannung (220/230V AC) vorhanden.</li> <li>- Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte kontinuierlich leuchten (eine blinkende LED oder kein Licht weist auf eine Fehlfunktion hin)</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind.</li> </ul> <p>Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.</p>
<b>Temperatur (Wärme) im Schrank funktioniert nicht oder ist gestört</b>	<p>Die Temperatur wird über Temperatursensoren im Schrank geregelt. Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Außentemperatur unter 0°C liegt, und schaltet sich aus, wenn die Innentemperatur des Schrankes 20°C erreicht. Hinweis: Damit die Heizung richtig funktioniert, muss die Schranktür geschlossen sein.</p> <p>Wenn der Verdacht besteht, dass die Heizung nicht funktioniert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffnen Sie die Tür. Der Alarm sollte ertönen. Wenn der Alarm nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus: "LED-Leuchten sind aus oder der Alarm funktioniert nicht".</li> <li>- Prüfen Sie die Temperatur im Schrank, indem Sie die Halterung, auf der AED steht, berühren (die Außentemperatur muss &lt; 0°C sein). Die AED-Halterung sollte sich im Vergleich zur Außentemperatur wärmer anfühlen. Ist dies nicht der Fall: Nehmen Sie den Schrank außer Betrieb, entfernen Sie den AED und wenden Sie sich an den Händler des SmartCase.</li> </ul> <p>Das Heizgerät ist ständig eingeschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernen Sie den AED.</li> <li>- Prüfen, ob die Schranktür richtig geschlossen ist. Wenn die Tür offen ist, schließen Sie die Tür. Warten Sie 5 Minuten und prüfen Sie, ob sich die Heizung abgeschaltet hat.</li> <li>- Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, entfernen Sie den AED, nehmen Sie ihn außer Betrieb, trennen Sie den Schrank vom Stromnetz und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.</li> </ul>
<b>Der Schrank schließt nicht richtig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfen Sie, ob die Tür durch etwas blockiert wird.</li> <li>- Prüfen Sie, ob das Schloss oder die Tür im Bereich des Schließmechanismus verformt ist.</li> </ul> <p>Wenn das Gerät nicht repariert werden kann, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.</p>

## Glossar

### AED

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät zur Ersthilfe bei Herzstillstand.

Es ist wichtig, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr für sofortige Hilfe im Notfall verfügbar ist.

### Bediener/Benutzer

Die Person, die für den Schrank und den AED verantwortlich ist. Seine/ihre Aufgabe ist es, den Status des AED und des Schanks zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Betrieb gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien erfolgt.

### Online-Dienstleistung

Für weitere Informationen oder Online-Hilfe besuchen Sie bitte unsere Website [www.sixcase.com](http://www.sixcase.com).

**Bedienungsanleitung:** Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen zur Bedienung des SmartCase. Updates werden auf unserer Website veröffentlicht.

**Haftungsausschluss:** GT MEDICARE ist in keiner Weise für die Verfügbarkeit oder Funktionsfähigkeit des im SmartCase-Schrank aufbewahrten AED verantwortlich. GT MEDICARE ist weder verantwortlich für die Installation, den Gebrauch oder den Betrieb des Schanks/AED noch für den Verlust von Daten, Einkommen, direkt oder indirekt, oder für verursachte Schäden an Dritten. Außergewöhnliche äußere Bedingungen, wie z.B. niedrige Temperaturen, defekte Teile oder andere äußere Einflüsse können dazu führen, dass der AED nicht mehr funktioniert. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in dieser Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern.

### Hersteller

GT Medicare BV  
Industrieweg 36A  
2382 NW Zoeterwoude  
The Netherlands  
T +031 (0) 71 2100 220  
E [info@sixcase.com](mailto:info@sixcase.com)

### Vertrieb

Procamed AG  
Schulstrasse 5  
8355 Aadorf  
Schweiz  
T +41 (0) 52 368 60 00  
E [info@procamed.ch](mailto:info@procamed.ch)

## Anhang: Technische Daten

### Technische Daten

Typ	SC1530
Gewicht	11 kg
Abmessungen	44(h) x 44(b) x 24(t) cm
Stoßsicher	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Schutzklasse	IP54 (Schutz gegen Strahlwasser und Staub)
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizung	Elektrisch bis -20 °C Außentemperatur
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Inklusive (Holz und Stein)
Strom	24V-Adapter (mitgeliefert)
Öffnung	Türknoopf (90 Grad Drehung)
Beleuchtung	LED rot und blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend
Max. Spitzenverbrauch	max 70W (Heizung ständig eingeschaltet)