

SmartCase – Technisches Datenblatt

Der SmartCase ist die optimale Lösung für die Aufbewahrung eines AEDs im Aussenbereich. Er besticht durch sein einzigartiges und robustes Design und ist dank seinem auffälligen AED-grün leicht ersichtlich. Eine Heizung sowie Lüftung zur Kühlung sorgen für ideale Temperaturbedingungen, so dass der AED stets einsatzbereit ist.

Eigenschaften

- Geeignet für ZOLL AED 3, AED Plus, Mindray C1A, C2, Powerheart (jeweils mit oder ohne Tasche)
- Leicht zu öffnender Handgriff
- Wasserfest (Niederschlag)
- Robustes Design aus Aluminium
- Schlagfestes Sichtfenster aus Polycarbonat mit UV-Schutz
- Netzteil im Kasten verbaut und geerdet
- Automatische Heizung (Winter)
- Automatische Lüftung (Sommer)
- Nachtbeleuchtung (blau) und optischer Alarm (rot blinkend) mittels LED
- Akustischer Alarm mit 95 dB (intermittierend)

Lieferumfang


- AED-Wandkasten SmartCase
- 24 V Netzteil inkl. 3m Stromkabel (für 230V AC)
- Wanddübel (SX 10 x 50 mm, 4 Stk.)
- Schrauben (M8 x 100 mm, 4 Stk.)
- Abstandhalter (Ø 15 x 25 mm, 4 Stk.)
- Unterlegscheiben (Ø 8 x 2 mm, 4 Stk.)
- Muttern (M8 x 5 mm, 4 Stk.)
- Montageanleitung

Bemassung

Vorderseite



Rückseite

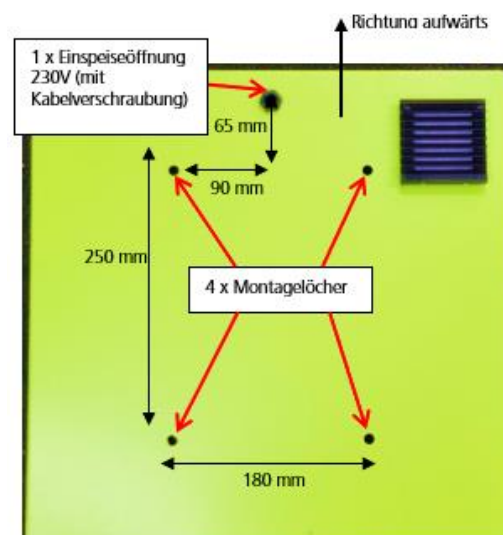

SmartCase – Technisches Datenblatt

Material und Gewicht

- Material Gehäuse: Aluminium
- Gewicht: ca. 11 kg

Netzteil

	SmartCase
Input	AC 100-240V – 2.0 A, 50/60 Hz
Output	VC 24V ---- 3A
Leistung max.	70 W
Installation	Im Kasten
Abmessung	ca. 12.5 x 5.5 x 3.1 cm



Heizung & Lüftung

Temperaturkontrolle mittels Lüftung und Heizung (Temperaturmessung innerhalb des SmartCase):

	Start	Ende
Lüftung	35 °C	25 °C
Heizung	5 °C	15 °C


Leistungsaufnahme Netzteil:

	SmartCase
Grundversorgung	3 W
Grundversorgung + Lüftung	5 W
Grundversorgung + Heizung	70 W

Standortwahl

Der SmartCase ist für den Aussenbereich geeignet. Um extreme Temperaturen zu vermeiden wird ein schattiger Standort oder die Verwendung eines separaten Schutzdachs (Art. SC-DA2) empfohlen.

Montage

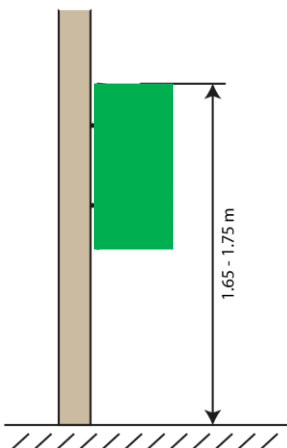

Es wird eine Montagehöhe von 1.65 m bis 1.75 m empfohlen bezogen auf die Oberkante des SmartCase.

Die Installation des Wandkastens muss durch eine entsprechende Fachperson gemäss den lokalen Anforderungen geschehen basierend auf der Montageanleitung des Herstellers. Es wird empfohlen die Installation zu zweit durchzuführen.