

Montageanleitung

Einsatz-Tragtasche CRS-MOD zu ZOLL X Series

Abdeckkappen am Griff mit spitzem Werkzeug lösen und die vier Schrauben am Griff lösen (links und rechts), um den Griff vom Gerät zu trennen.

Hinweis: Falls Ösenset «Version MCS» verwendet wird, ist dieser Schritt nicht nötig.

1



Ösen am Griff befestigen und Griff wieder an das Gerät schrauben.

☞ Darauf achten, dass das Ösenband nicht eingeklemmt wird.

Abdeckkappen wieder am Griff befestigen.

2



Tasche am Gerät anbringen.

Befestigungsband der Tasche um den Griff ziehen, durch die Öffnung führen und an der Innenseite der Tasche am Klettverschluss befestigen. (links und rechts)

3



Montageanleitung


Einsatz-Tragtasche CRS-MOD zu ZOLL X Series

Kunststoffschnallen an den Lederösen der Tasche abschneiden und entsorgen. (links und rechts)

☞ Darauf achten, dass die Kunstlederösen nicht beschädigt werden.

Das Verbindungsband (schwarzes Gurtband) kann ebenfalls entsorgt werden.

4

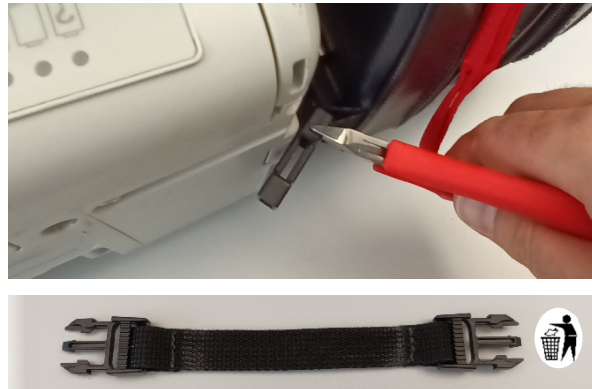

Neues Verbindungsband (rotes Kunstlederband) an den Kunstlederösen der Tasche einfädeln.

Auf richtige Ausrichtung Achten:
Druckknopf auf der Seite des Druckers und die Oberseite des Druckknopfs vom Gerät abgewendet.

☞ Um mehr Bewegungsfreiheit zu haben, kann der rechte Metallbügel vom Verbindungsband gelöst werden.


5



Verbindungsband wieder einfädeln und fixieren (Druckknopf schliessen).

Die Metallbügel sollen so ausgerichtet sein, dass die Öffnungen der Metallbügel in der Kunstlederöse sind.

6

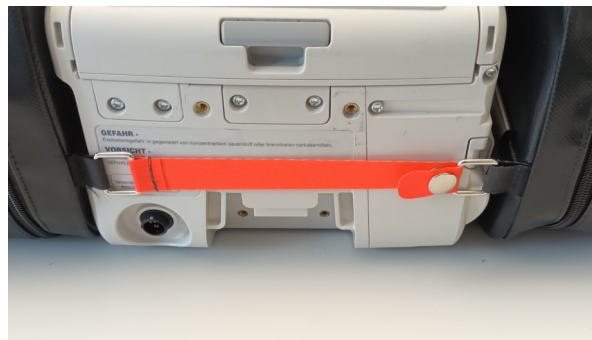


Montageanleitung

Einsatz-Tragtasche CRS-MOD zu ZOLL X Series

Distanzhülsen auf die Gewindebuchsen an der Rückseite des Gerätes platzieren (2x).

7

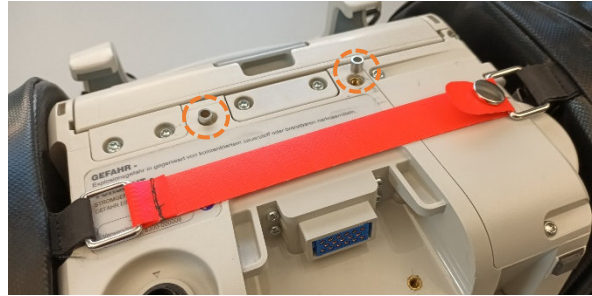

Rückhalteplatte positionieren und Stromstecker einstecken.

☞ Darauf achten, dass die Distanzhülsen nicht verschoben werden.

8



Zugentlastungsblech positionieren und die vier Schrauben inkl. Unterlagscheiben festschrauben.

☞ Wichtig: Bei der Montage das Verbindungsband möglichst weit nach rechts ziehen und zum Schluss das Ende des Verbindungsbandes über die Rückhalteplatte ziehen damit ausreichend Platz für die Bedienung des Druckknopfes verfügbar ist.

9

