

## Montageanleitung

### 3-teilige Tasche ZOLL X Series

Lieferumfang kontrollieren

- 1) Alu-Box
- 2) Tasche Unten
- 3) Tasche links
- 4) Befestigungsband links
- 5) Tasche rechts
- 6) Befestigungsband rechts
- 7) Schrauben – 2 Stück
- 8) Schulter-Traggurt


Benötigtes Werkzeug:  
Inbusschlüssel Grösse 4

# 1



Alu-Box in die Tasche Unten einschieben.  
☞ Auf die richtige Lage der Alu-Box achten.

# 2

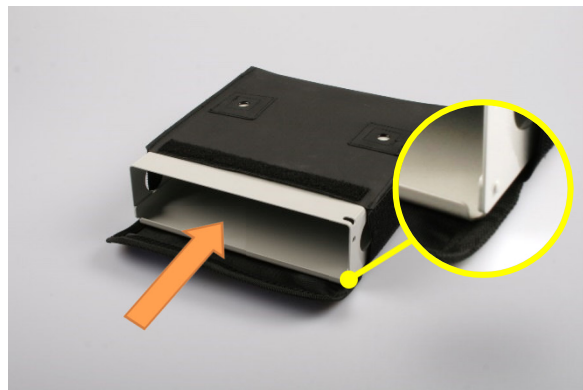

Tasche Unten (mit eingelegter Alu-Box) mit den zwei Schrauben an die ZOLL X Series schrauben.  
☞ Sicherstellen, dass die Aluwinkel mit Gewinde an der ZOLL X Series montiert sind.

# 3



## Montageanleitung

### 3-teilige Tasche ZOLL X Series

Seitentaschen (links und rechts) anbringen und Befestigungsbänder korrekt in der oberen Schlaufe positionieren.

☞ Befestigungsschleife ganz nach vorne ziehen, so dass der D-Ring (für Befestigung des Schulter-Traggurts) an der hinteren Kante der oberen Schlaufe ansteht.

# 4



Befestigungsschleifen am Griff festmachen:

- unter dem Griff durchziehen
- durch den Kunststoffspanner führen und Befestigungsschleife satt anziehen
- rückwärts unter dem Griff durchziehen und Klettverschluss rundum sauber schliessen

# 5



Tasche unten öffnen und die beiden Klettverschlusslaschen der Seitenteile an der Innenseite der Alu-Box ankleben.

Mit einem flachen Gegenstand die Klettverschlusslaschen sauber verstauen.

# 6

